

歯科用充填器

LMアルテ

LM アルテ ポステリア ミスラ LM 498-499 XSi



LM アルテ アプリカ LM 46-49 XSi



LM アルテ コンデンサー LM 488-489 XSi



LM アルテ フィスラ LM 481-487 XSi



LM アルテ ミスラ LM 496-497 XSi



LM アルテ エクセン LM 307-308 XSi




LM アルテ ツイスト LM 464-494 XSi



LM アルテ モデラ LM 442-443 XSi



Fissura

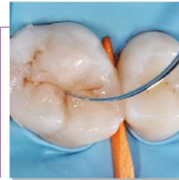

LM アルテ フィスラ

Sculp delicately

先端が細く尖った形成用インストゥルメントです。円錐形のチップは形成に最適で、この1本だけで臼歯部の咬合面を解剖学的形態に形成することができます。プローブ形の細いチップは裂溝やマメロンの形成、および特徴付け用のコンポジットレジンやシーラントの築盛に適しています。柔軟性があるので、歯面の余剰な接着レジンの探査もやさしくできます。

Misura



LM アルテ ミスラ

Measure precisely

このユニークなインストゥルメントは、前歯修復物におけるコンポジットレジンの水平的、垂直的な厚みを計測することができます。築盛後、デンチンレジンの重合を行う前に、天然歯のエナメル質の上にこのインストゥルメントの細い方の円錐形チップを水平に置きます。すると、円錐形チップの下に残った未重合のコンポジットレジンがやさしく形作られ、エナメルコンポジット層に最適なスペース(0.5 ~ 0.7mm)を残します。太く短い方のチップは形成済みの窩洞のマージン上に垂直に置きます。するとチップの端が天然歯質のエナメル質に残ります。こうしてフィニッシングラインに適用する透明なレジンを量を正確に決定することができます。その結果、最終的に審美的な修復物は適切な量のオペークとトランスルーセントコンポジットが適用することができ、不快なグレイ効果が生じません。

Posterior




LMアルテ ポステリア ミスラ

Measure and model handy

臼歯用のミスラインストゥルメントです。臼歯部修復物のコンポジットレジン層の厚みを垂直的に計測することが可能です。また、チップを隣接部の壁に当てることでマトリックスを挟んだ状態の隣接歯の解剖学的構造が復元可能です。

Eccesso

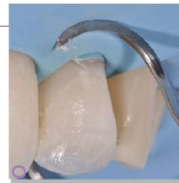


LMアルテ エクセン

Finish neatly

余剰なコンポジットレジンやボンディング材を除去するインストゥルメントです。特別な角度をつけたワーキングエンドは前歯の歯頸部や臼歯部の隣接歯間での除去に理想的です。この繊細かつ硬いインストゥルメントは、最適な長さ、太さ、幅を持ったブレードが特徴です。

Applica

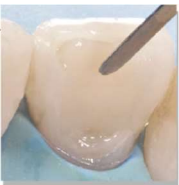


LMアルテ アプリカ

Apply elastically

この薄型で柔軟なスパチュラはコンポジットレジンの適用と審美的な形成のためにデザインされました。弾力のあるワーキングエンドがレジンを歯牙の形態にやさしく正確に築盛します。アプリカは幅の狭いスペースにもマトリックスバンドに沿わせても使用することができます。

Twist

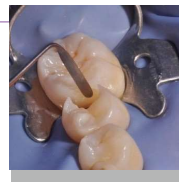


LMアルテ ツイスト

Apply with a twist

レジンの築盛に使用する非常に繊細・柔軟でチップ幅が狭いスパチュラです。マトリックスを装着した歯牙の隣接面や辺縁隆線の築盛を簡単に行うことができます。先端部が曲がっているので、手の位置を何度も変えることなく到達の困難な部位に容易にアクセスすることができます。

Condensa

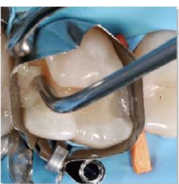

LMアルテ コンデンサー

Push softly

この長く丸いプラガーは特にコンポジットレジンの形成のためにデザインされました。カーブをつけたシャックがあらゆる窩洞へのアクセスを可能にします。太いチップと細いチップが付いているので、様々な大きさの前歯および臼歯部の窩洞に対応します。ワーキングエンドは丸みがあるため、コンポジットレジンがくっつかずに 繊細な充填をすることができます。

Modell



LMアルテ モデラ

Model flexibly

レジンの築盛に使用する非常に繊細でチップ幅が広いスパチュラです。切歯の舌側面のような広い歯面に特に適しています。この幅広のチップによってレジンをより滑らかに築盛することができます。チップの柔軟性、繊細性、鋭敏性によって正確で審美的な細部が得られます。レジンをシリンジから適用するのも簡単に行えます。

5-D Japan セミナー 推薦 ご注文リスト

商品名	規格	定価	会員価格	ご注文数
LM アルテ ポステリア ミスラ	LM 498-499 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ アプリカ	LM 46-49 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ コンデンサー	LM 488-489 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ フィスラ	LM 481-487 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ ミスラ	LM 496-497 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ エクセソ	LM 307-308 XSi	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ ツイスト	LM 464-494 XS	¥7,500	¥5,400	
LM アルテ モデラ	LM 442-443 XSi	¥7,500	¥5,400	

※上記価格に消費税は含まれておりません。※消費税率は10%です。

※15,000円(税別)以上のご注文にて、送料無料となります。

※お届けまでにお時間を要する場合がございます。

※価格は予告なく変更される場合がございます。

医院名	お名前
住 所 〒	
TEL	FAX
E-mail	
<p>※FAXまたはEmailにてご注文下さい。</p> <p><input type="checkbox"/> アメリカン・エクスプレス・カード決済</p> <p><input type="checkbox"/> ダイナース・クラブ・カード決済</p> <p>注 ※カード決済ご希望の方は、事前にカード登録が必要となります。あらためてご連絡申し上げます。</p> <p><input type="checkbox"/> 代引きによる決済 別途代引き手数料が必要です</p>	

【お問合せ先】

〒 920-8611 石川県金沢市浅野本町 1-10-10

株式会社ADI.G内 5-D Japan 担当宛

TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115

E-mail : mtogimitsu@adig.jp

ご注文日

年 月 日

2023-3